
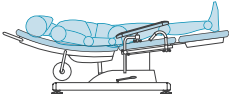
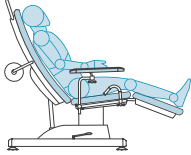
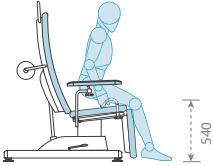
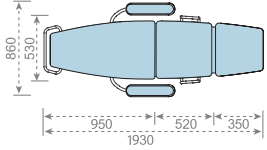
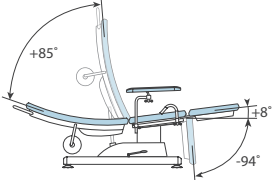
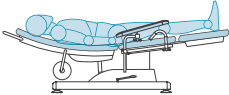
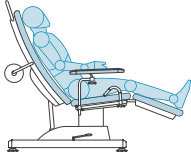
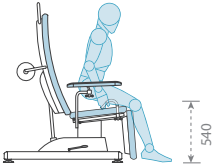


DE

BEDIENUNGSANLEITUNG BLUTENTNAHMESTUHL N

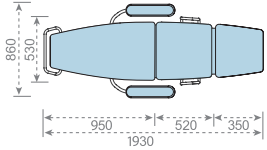

INHALT

1. Sicherheit und Wartung	2
2. Kurzangaben	3
3. Technische Beschreibung	4
4. Ausrüstungsliste	4
5. Bedienungsanleitung	5
6. Konformitätserklärung des Herstellers	6
7. Garantieschein	7

1. SICHERHEIT UND WARTUNG

Vorbereitung und Auspacken

- Plastikfaden abschneiden und Kartonage entfernen. Zum Öffnen des Kartons kein Messer benutzen! Dieses kann die Polsterung beschädigen.

- Entfernen Sie die Schutzfolie von der Liegefläche und anderen Tischteilen – kein Messer benutzen, es könnte die Polsterung beschädigen.

- Schneiden Sie die Schutzbänder durch.

- Die Verpackung ist aus umweltfreundlichen, recycelbaren Materialien hergestellt. Bitte entsorgen Sie das Verpackungsmaterial fachgerecht bei einer Sammelstelle.

- Stellen Sie den Stuhl auf einen ebenen Boden und lösen oder ziehen Sie die 4 kleinen Beine an, damit der Stuhl fest und stabil steht.



Sicherheitshinweise

- Stecken Sie Hände und Füße nicht in die beweglichen Teile des Stuhls!

- Lassen Sie Kinder nicht ohne Aufsicht in der Nähe des Stuhls, es besteht Verletzungsgefahr!!!

- Achten Sie darauf, dass weder der Patient noch Sie selbst sich beim Heben oder Senken der Liegefläche mit den Händen, Füßen oder sonstigen Körperteilen in der Nähe oder zwischen den sich bewegenden Teilen des Untergestells befinden.

- Achtung! Beim Heben/Senken des Rückenteils die Armstützen (Polsterung und Metallteile) immer parallel zur Liege halten, wie in der Abbildung gezeigt. Unsachgemäße Behandlung kann zu Schäden an der Polsterung oder den Armstützen führen.

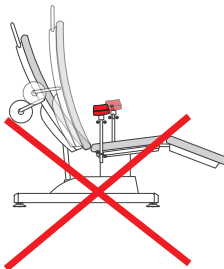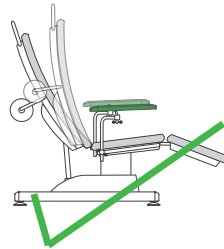

Reinigung

- Den gesamten Stuhl bitte regelmäßig mit einem feuchten Tuch und Haushaltsreinigungsmittel reinigen. Verwenden Sie dazu einen weichen Lappen, lauwarmes Wasser und ein Haushaltsreinigungsmittel (kein Scheuermittel).

Weitere Informationen zur Reinigung und Benutzung von Desinfektionsmitteln erhalten Sie bei dem Hersteller oder bei unseren Fachhandelspartnern.

- Halten Sie die Scharniere und Gelenke trocken.


- Schmierung der Metallteile ist nicht nötig.

- Die geschätzte Lebensdauer des Produktes ist 10 Jahre.


!!!! Vor Gebrauch die Bedienungsanleitung aufmerksam lesen und Sicherheitsanweisungen einhalten (Seite 5)

2. KURZANGABEN


Blutentnahmestuhl N READY (BON-R)

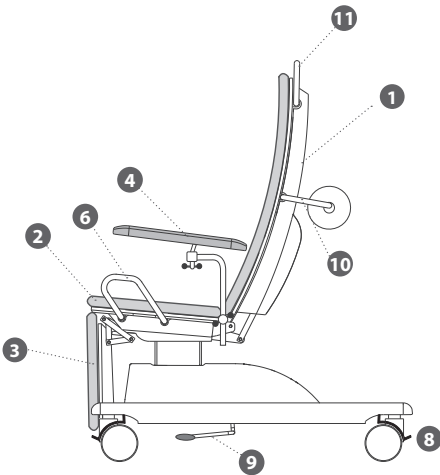

Blutentnahmestuhl N STEADY (BON-S)

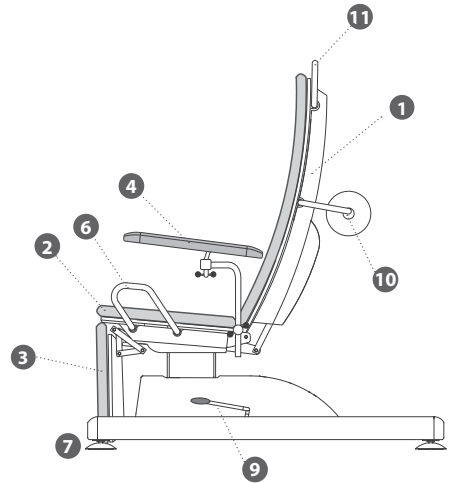

Blutentnahmestuhl N GO (BON-G)

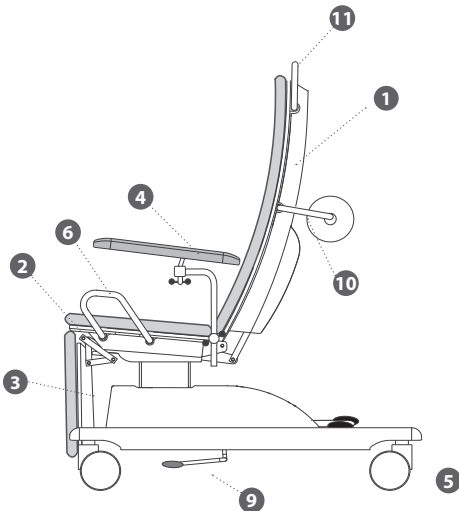

- 1 Rückenteil
- 2 Sitzteil
- 3 Beinteil
- 4 verstellbare Armstützen
- 5 zentral blockierbare Rollen (GO)
- 6 Haltegriffen
- 7 Beine (STEADY)
- 8 einzeln blockierbare Rollen (READY)
- 9 S.O.S. Hebel
- 10 Papierrollenhalter
- 11 Schiebegriffe

3. TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Code	BON-R	BON-S	BON-G
Liegelänge	193 cm	193 cm	193 cm
Liegebreite	86 cm	86 cm	86 cm
Liegehöhe	54 cm	54 cm	54 cm
Gewicht cca.	83 kg	81 kg	87 kg
Rückenteilverstellung	Blockierbar Gasfeder synchronisiert mit dem Beinteil	Blockierbar Gasfeder synchronisiert mit dem Beinteil	Blockierbar Gasfeder synchronisiert mit dem Beinteil
Beinteilteilverstellung	synchronisiert mit dem Rückenteil	synchronisiert mit dem Rückenteil	synchronisiert mit dem Rückenteil
Polsterung	Lederimitation	Lederimitation	Lederimitation
Tragkraft	300 kg	300 kg	300 kg

4. AUSTRÜSTUNGSLISTE

Code	BON-R	BON-S	BON-G
dickere nahtlose Polsterung (6 cm)	●	●	●
genähte Polsterung mit Gedächtnisschaum (STU1) (8 cm)	○	○	○
extra weiche genähte Polsterung mit Gedächtnisschaum (STSU1) (12 cm)	○	○	○
verstellbare Armstützen	●	●	●
Haltegriffen	●	●	●
Schiebegriffe	●	●	●
Papierrollenhalter	●	●	●
Infusionsständer (SIF5)	○	○	○
PVC Schutzüberzug für Beinteil (PVC-N)	○	○	○
Kopfkissen N (HCN)	○	○	○
Beine (STEADY)	---	●	---
einzel blockierbare Rollen (READY) (Ø 125 mm)	●	---	---
zentral blockierbare Rollen (GO) (Ø 125 mm)	---	---	●
Erdung	●	●	●


● Serienmäßig
○ Option
--- Nicht lieferbar

5. BEDIENUNGSANLEITUNG

• Synchrone Verstellung des Bein- und Rückenteils der Liege


Um den Stuhl in eine liegende/ sitzende Position einzustellen, auf den S.O.S. Halter (1) treten und mit der Hand das Rückenteil der Liege nach unten/oben drücken/ziehen. Das Beinteil der Liege bewegt sich synchron.

Während des Einstellens des Rückenteils halten Sie ausschließlich die Schiebegriffe der Liege, wie in der Abbildung (2) dargestellt ist.

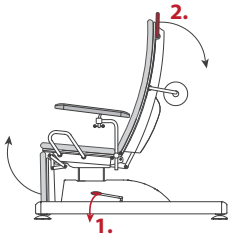


• Verstellbare Armstützen

Zum Einstellen der Armstützenhöhe lösen Sie die Schrauben, bringen Sie die Armstützen in die gewünschte Position und ziehen Sie die Schrauben wieder fest. Bevor Sie die Lehne benutzen, vergewissern Sie sich, dass die Schraube fest angezogen ist (maximale Belastung 4 kg).

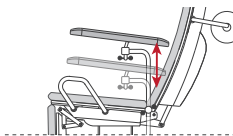



• Papierrollenhalter

Setzen Sie die Papierrolle an die Halterung und stellen Sie sie in den Papierhalter über den Stuhl (wie in der Abbildung gezeigt).

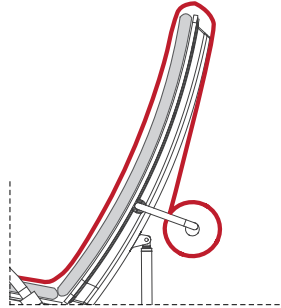


• Einzel blockierbare Rollen (READY)

Die Rollen sind mit Bremsen versehen, die durch Drücken auf die Fahne aktiviert und durch Drehen in entgegengesetzter Richtung deaktiviert werden. Um den Stuhl zu stabilisieren, müssen alle vier Bremsen aktiviert werden sein.

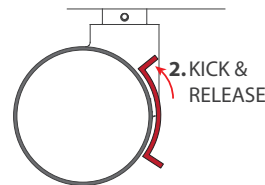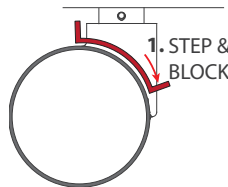

• Zentral blockierbare Rollen (GO)


Mit dem Hebel werden die Rollen blockiert, eingerichtet oder frei bewegt.

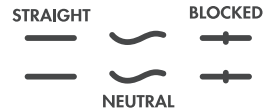

• Erdung

Die Schraube (1), die Unterlegscheibe (2) und die Schraubenmutter (3) für die Erdungsleitung sind deutlich etikettiert.

Das Erdungskabel (4) ist nicht beige packt.

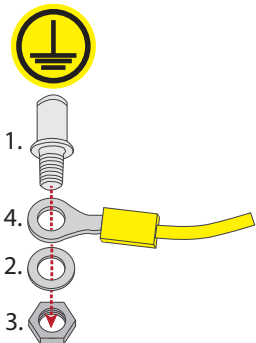

6. KOMFORMITÄTSERKLÄRUNG DES HERSTELLERS (DECLARATION OF CONFORMITY)

KOMFORMITÄTSERKLÄRUNG
No.: 1203226

Hersteller: **Novak M d.o.o.**
.....
Anschrift: **Pod smrekami 5
1218 Komenda
Slovenija**
.....
Produkt: **Blutentnahmestuhl N**
.....
Modell: **BON**



Hiermit wird bestätigt, dass die Produkte den grundlegenden Anforderungen der **EWG-RICHTLINIE ÜBER MEDIZINPRODUKTE (MDD 93/42/EWG)** erfüllen und in die **Klasse I** eingestuft werden (**Anhang IX der Regelung 12**).

Die Konformität der Produkte wurde durch die Prüfungen im **Anhang VII** (Annex VII) nachgewiesen.
Die entsprechenden Normen und technischen Spezifikationen stehen am Sitz der Firma Novak M zur Verfügung.

Ort und Datum der Konformitätserklärung: Komenda, 1.10.2014
Novak Miha, General Manager

A rectangular box containing a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Miha Novak'.

7. GARANTIESCHEIN

Produktname: **Blutentnahmestuhl N**

Modell: **BON**

Käufer:

Anschrift:

Stempel und Unterschrift
des Herstellers:



Stempel und Unterschrift des Verkäufers:


Garantiebedingungen:

Novak M d.o.o. leistet Garantie für das ordnungsgemäße Funktionieren des Produktes für 24 Monaten ab Verkaufstag. Die Garantie für die Polsterung beträgt 12 Monate. Novak M d.o.o. verpflichtet sich, alle bei normaler Benutzung entstehenden Mängelbeseitigungskosten und Übertragungs- bzw. Transportkosten innerhalb des Garantiezeitraums zu tragen. Der Käufer muss den Hersteller von einem unter Garantie stehenden eventuellen Schaden in Kenntnis setzen. Die Garantie gilt nur bei Vorlage der Originalrechnung.

Die Garantie gilt nicht, wenn:

- der Käufer die Produktbedienungsanleitung nicht beachtet hat;
- eine unbefugte Person in das Produkt eingegriffen hat;
- der Käufer das Produkt unsachgemäß und nachlässig verwendet hat;
- sonstige Teile, die keine Originalteile darstellen, in das Produkt eingebaut worden sind;
- der Schaden während des Transports nach Übergabe des Produkts an den Käufer entstanden ist.

Unter Garantie stehende Schäden werden in der Garantiezeitdauer innerhalb von 45 Tagen behoben; andernfalls verpflichten wir uns, das Produkt durch ein neues zu ersetzen. Wartungsdienstleistungen und Ersatzteile werden 10 Jahre ab Verkauf des Produktes garantiert.

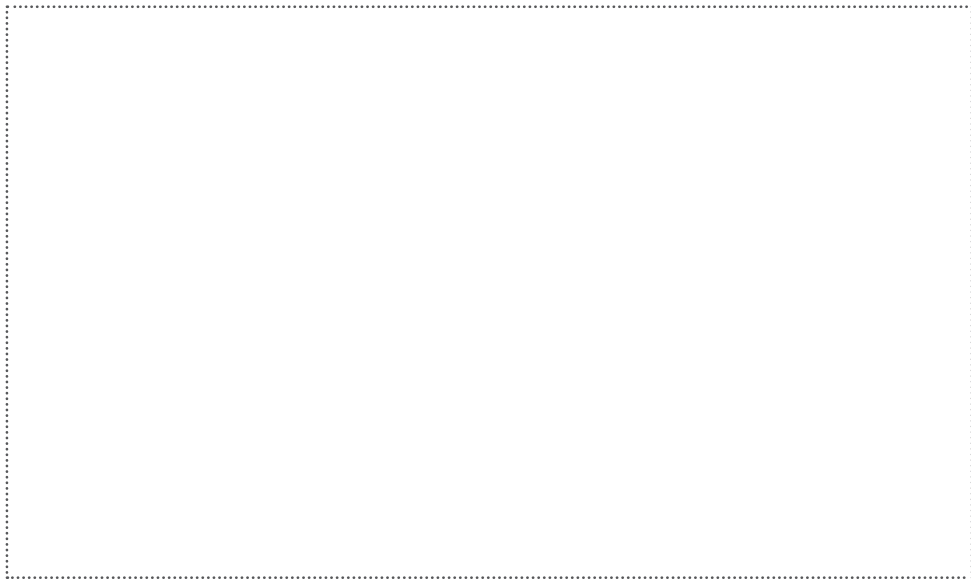

Novak M d.o.o.
the comforts of medicine

*Pod smrekami 5
1218 Komenda
Slovenija
www.novak-m.si
e-mail: info@novak-m.si*

T: +386 1 562 0117
F: +386 1 562 0118

10. 7. 2017