
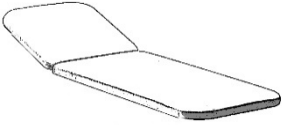


Reinigungsempfehlungen für Novak M Untersuchungs-, Therapie- und Massageliegen S

	MATERIALIEN	REINIGUNG	DESINFEKTION
KONSTRUKTION 	pulverbeschichteter Stahl, verchromt Stahl, rostfreier Stahl	Eine regelmäßige Reinigung wird empfohlen. Verwenden Sie ein weiches Mikrofasertuch und eine Mischung aus Wasser und Seife. Trocken abwischen. Verwenden Sie nicht scheuernde Reinigungsmittel!	Für die Desinfektion gelten die gleichen Anweisungen wie für die Polsterung.
	Kunststoffabdeckung	Staub und trockener Schmutz sollten mit einem weichen, feuchten Tuch entfernt werden. Es sollten herkömmliche, nicht scheuernde Haushaltsreiniger verwendet werden. Anschließend gut abwischen und mit einem trockenen Tuch abtrocknen. Verwenden Sie kein Aceton, keine chemischen Reinigungsmittel, Lösungsmittel und Reinigungsmittel, die zu den chemischen Gruppen der Ketone, Ester und aromatischen Lösungsmittel gehören.	
POLSTERUNG 	Kunstleder	Eine regelmäßige Reinigung wird empfohlen. Verwenden Sie warmes Wasser und ein Mikrofasertuch oder einen Schwamm. Bei Flecken verwenden Sie eine Mischung aus Seife und warmem Wasser. Entfernen Sie Seifenreste mit einem feuchten Tuch, wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach und lassen Sie die Oberfläche vollständig trocknen. Blutflecken müssen sofort mit kaltem Wasser entfernt werden. Rückstände von Massageöl und Lotion sollten sofort mit einer Mischung aus Wasser und Seife entfernt werden. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Lösungsmittel, Aceton oder Säuren. Verwenden Sie zur Pflege keine öl- oder fetthaltigen Lederpflegemittel.	Reinigen und trocken Sie die Polsterung vor jeder Desinfektion! Eine Liste der zugelassenen Desinfektionsmittel finden Sie im Anhang. Befolgen Sie stets die Anweisungen auf der Verpackung. Verwenden Sie immer nur ein Desinfektionsmittel!

Reinigungsempfehlungen für Novak M Untersuchungs-, Therapie- und Massageliegen S

Hauptwirkstoffgruppe	Desinfektionsmittel
Quaternäre Ammoniumverbindungen und Amine	Cleanisept AF wipes Incidin Extra Incidin Pro Kohrosolin FF Lysoformin Plus Microbac forte Mikrozid universal wipes Mikrozid sensitive wipes Mikrozid AF wipes Terralin protect
Perverbindungen	Descogen Dismozon Perform
Formaldehyd und/oder andere Aldehyde, Derivate	Incidin Plus Incidin Kohrsolin Optisept
Alkohol	Bacillol AF Bacillol Plus Bacillol 30 foam Bacillol 30 tissues Incidin liquid Meliseptol foam fresh Meliseptol foam pure

Haftungsausschluss

Die Gebrauchsanweisung des Desinfektionsmittels muss in allen Fällen nachgeschlagen werden. Beeinträchtigung des Polstermaterials bei Langzeitanwendung ist nicht ausgeschlossen. Novak M übernimmt keine Verantwortung für die desinfizierende Wirkung der oben genannten Mittel.

Komenda, Mai 2023