

SALVA®

Transportstuhl
für sichere Mobilität



LIKAMED®

Sichere Mobilität mit Komfort

Der LiKAMED Transportstuhl, ist speziell für den sicheren Patiententransport entwickelt und bringt Ihre Patienten sicher von einem Ort zum anderen, sei es bei der Verlegung von Patienten zwischen verschiedenen Bereichen oder in Notfällen.

Mit ergonomischer Sitzposition und verstellbarem Rücken- und Fußteil sowie einstellbaren Armlehnen bietet SALVA einen hohen Patientenkomfort.



SALVA® plus

Unsere
**REHA-
EMPFEHLUNG**

Die wichtigsten Optionen als Paket:

- ✓ Höhenhub
- ✓ Rücken- und Fußteil synchron verstellbar
- ✓ Ausziehbares Fußbrett

Die Vorteile des SALVA® Transportstuhls von LiKAMED

- Besonders mobil durch geringes Gewicht, leichtlaufende Outdoor-Räder und agile Rollen.
- Einstiegs- und Aufstieghilfe für Patienten mit eingeschränkter Mobilität.
- Hoher Patientenkomfort durch ergonomische Polsterauflage.
- Individuelle Anpassung durch verstellbares Rücken- und Fußteil sowie neigbare Armstützen.
- Einfache Bedienung und Handhabung.
- Langfristige Nutzung durch strapazierfähige Materialien und insgesamt hohe Produktqualität.

 Made in
Germany

SALVA® Transportstuhl

Der effiziente Klinikhelfer

215 kg

Mit einer maximalen Belastungsmöglichkeit von 215 kg auch für schwere Patienten geeignet.

+ Niedrige Einstiegshöhe

Das komfortabel geneigte Sitzteil mit einer niedrigen Sitzhöhe von 48 cm ermöglicht einen einfachen Patienteneinstieg, auch von der Seite.

+ Zentralarretierung

Die hinteren Rollen können mit dem Fußhebel arretiert werden. Die Rollen sind rundum schwenkbar und für den Einsatz auch im Außenbereich mit einer entsprechenden Lauffläche ausgestattet.

+ Universelle Polsterauflage

Der robuste Schichtschaum ist ideal für den universellen Einsatz bei einem stetigen Patientenwechsel.

+ Fußteil abklappbar

Das komplett abwinkelbare Fußteil spart Platz und ermöglicht einen einfachen Fronteinstieg.

+ Räder Ø 30 cm

Die großen Outdoor-Räder sind besonders komfortabel im Handling und überwinden auch kleinere Hindernisse.



Individuelle Flexibilität durch Sitz-, Komfort- und Liegeposition

Stufenlose, unabhängige manuelle Verstellung von Rücken- und Fußteil. Für Notfälle absenkbar bis zur Kopftieflagerung.

+ Gepolsterte Armstützenauflagen

Die geschäumten Armstützenauflagen zeichnen sich durch eine weiche Oberfläche, ihre Langlebigkeit und besonders einfache Reinigung aus.

+ Nackenrolle

Für den Patientenkomfort ist eine höhenverstellbare Nackenrolle fest integriert.



+ Antistatische Rollen Ø 12,5 cm mit Richtungsfeststellung

Wird die Liege über längere Strecken oder Gänge bewegt, kann die Richtungsfeststellung in den vorderen Rädern aktiviert werden. Alle vier Rollen sind rundum schwenkbar, um eine maximale Wendigkeit auf engstem Raum zu erreichen.



Hochklappbare Armstützen mit Neigungsverstellung

Für einen einfachen Seiteneinstieg und für den schnellen Patientenzugriff in einer Notfallsituation vollständig wegklappbar.



Schiebegriff

Im ergonomischen Schiebegriff ist die leichtgängige Rückenteilverstellung integriert.

Farben für jede Umgebung

SALVA Polsterauflage



stein



safran



kiwi



agave



azur



saphir

Das Kunstleder der Polsterbezüge hat eine angenehme Oberfläche und ist besonders langlebig. Die Polsterbezüge sind schmutzunempfindlich, kratz- und reißfest sowie desinfektionsmittelbeständig.

Aus drucktechnischen Gründen sind Farbunterschiede zwischen Darstellung und Produkt nicht auszuschließen. Bei Interesse fordern Sie bitte Ihr persönliches Originalfarbmuster an.

Für jeden Bereich die passende Option

Einstiegs- und Aufstehhilfe

Kommen Sie den Patienten mit der Aufstehfunktion entgegen. Gerade für ältere Patienten ist ein einfacher Ein- und Ausstieg besonders wichtig. Eine hilfreiche Unterstützung bei eingeschränkter Mobilität und zugleich eine komplette Entlastung des Pflegepersonals während der Mobilisierung des Patienten.



Höhenhub

Passen Sie die Sitzhöhe an die individuellen Bedürfnisse von Patienten und Personal an.



Rücken- und Fußteil synchron verstellbar

Beim Verstellen der Rückenlehne wird das Fußteil automatisch mitgeführt.



Ausziehbares Fußbrett

Das Fußbrett wird bei Nichtverwendung einfach platzsparend eingeschoben und behindert so weder Patient noch Pflegepersonal.



Räder Ø 30 cm

Outdoor-geeignete Räder für häufige und längere Transportwege im Klinikbereich.




Antistatische Doppel-Laufrollen

Die vier elektrisch leitfähigen Doppelrollen Ø 12,5 cm, mit Richtungsfeststellung vorne, sind besonders leichtlaufend und haben eine geschlossene hygienische Bauweise.



Infusionsstangenhalter

Mobilität erhalten mit der beidseitig montierbaren Infusionsstangenhalterung.

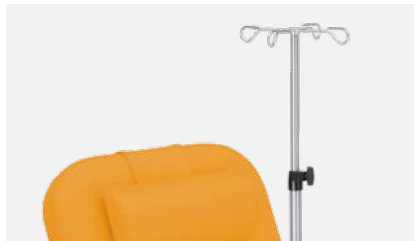

Infusionsstange inkl. Flaschenkreuz

Die höhenverstellbare Ergänzung für den Infusionsstangenhalter.



Normschienen

Die beidseitigen Normschienen am Sitzteil sind ideal zur sicheren Montage von Zubehör.

Focused on design and quality

likamed.de



Made in
Germany

Technische Daten	SALVA
Armstützen Länge x Breite x Höhe Vollschaum-Armstützenauflagen	39 cm x 7 cm x 4 cm
Polsterauflage Länge x Breite x Höhe Bezug	166 cm x 50 cm x 4–10 cm UV-beständig, feuchtigkeitsundurchlässig, auf Biokompatibilität und Toxizität geprüft, flammgeprüft und besonders langlebig.
Gesamtlänge (max.) x Gesamtbreite (max.) x Gesamthöhe (max.) mit Höhenhub	166 cm x 69 cm x 122 cm 166 cm x 69 cm x 145 cm
Bodenfreiheit mit Fußbrett	60 mm 40 mm
Sitzhöhe mit Höhenhub	48 cm 48 cm bis 75 cm
Neigungswinkel Rückenteil (zum Sitzteil) Sitzteil Sitzteil mit Ein- bzw. Ausstiegshilfe Fußteil (zum Sitzteil)	12° bis 82° 8° 8° bis -17° 10° bis -90°
Rollen und Räder Ø 12,5 cm antistatische Rollen mit Richtungsfeststellung vorne und Zentralarretierung hinten Ø 12,5 cm antistatische Doppel-Laufrollen mit Richtungsfeststellung vorne und Zentralarretierung hinten Ø 30 cm Räder vorne und Ø 12,5 cm Rollen mit Zentralarretierung hinten	● ○ ○
Manuelle Verstellung Rückenteil Fußteil Rücken- und Fußteil synchron verstellbar Höhenhub Fußbrett ausziehbar	● ● ○ ○ ○
Maximale Belastung	215 kg
Farbe Gestell	hellgrau - RAL 7047
Farbe Fußbrett	lichtgrau - RAL 7035
Gewicht (ohne Optionen)	60 kg
Garantie	2 Jahre

● = Serie ○ = Option

Die Angaben entsprechen dem Druckzeitpunkt. Die LiKAMED GmbH übernimmt keine Gewähr für Abweichungen von den Abbildungen in Farbe und Form. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Die LiKAMED GmbH behält sich vor, jederzeit Änderungen an Veröffentlichungen und Produkten vorzunehmen. Wird in dieser Broschüre aus Gründen der besseren Lesbarkeit die männliche Form oder das generische Maskulinum verwendet, werden dabei die weibliche und andere Geschlechteridentitäten ausdrücklich mitgemeint.

LiKAMED®

LiKAMED GmbH
Raußmühlstraße 7 · 75031 Eppingen · Deutschland
Tel.: +49 7262 9189-0 · E-Mail: info@likamed.de

