

BENUTZERHANDBUCH



BLUTENTNAHMESTÜHLE
HAEMO-FLEXA

Inhaltsverzeichnis

1. Zweckbestimmung	3
2. Sicherheitshinweise	4
3. HAEMO-FLEXA	5
4. Zubehörteile	6
5. Gebrauch	6
6. Wartung und Pflege	8
7. Ersatzteile	8
8. Entsorgung	9
9. Herstellerangaben	9
10. Konformitätserklärung	10

MOIN,

vielen Dank, dass Sie sich für einen Blutentnahmestuhl der Firma SIMPEX entschieden haben. Dieses Produkt wurde speziell für den Einsatz in Gesundheitseinrichtungen entwickelt und kombiniert Funktionalität mit modernem Design.

Lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut auffindbar in der Nähe des Produkts auf. Die hier abgebildeten Anweisungen sind von jeder Person zu lesen und anzuwenden, die das Produkt nutzt, bedient, reinigt oder desinfiziert.

1. ZWECKBESTIMMUNG

Die SIMPEX-Blutentnahmestühle dienen der sicheren und komfortablen Sitzposition von Patienten während Blutentnahmen oder vergleichbarer medizinischer Eingriffe. Sie gewährleisten eine stabile Haltung und erleichtern dem medizinischen Fachpersonal die Durchführung der Eingriffe. Die Stühle sind für den Einsatz in professionellen medizinischen Einrichtungen, wie Arztpraxen und Laboren, bestimmt.

Modell	Einsatzbereich
HAEMO-FLEXA	Blutentnahme-, EEG- und Infusionsstuhl

2. SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG

- Chromteile enthalten **NICKEL** und können somit eine Kontaktallergie auslösen
- Der Blutentnahmestuhl ist ausschließlich für medizinische Zwecke vorgesehen.
Jede andere Nutzung kann gefährlich sein.
- Stellen Sie sicher, dass der Blutentnahmestuhl auf einem ebenen, rutschfesten Untergrund steht.
- Überschreiten Sie nicht die maximale Belastbarkeit des Blutentnahmestuhls
- Reparaturarbeiten dürfen nur durch ausgebildetes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Benutzen Sie das Produkt nur in einwandfreiem Zustand, sowie zweckbestimmt, sicherheits- und gefahrenbewusst
- Beachten Sie zusätzlich die allgemeingültigen gesetzlichen und sonstigen verbindlichen Regelungen zur Unfallverhütung und Umweltschutz
- Ersatzteile müssen den vom Hersteller festgelegten Anforderungen entsprechen.
Dies ist bei Originalersatzteilen immer gewährleistet

HINWEIS

- Unser Kunstleder ist phtalatfrei und somit allergen unbedenklich
- Nehmen Sie keine Veränderungen, An- und Umbauten am Produkt ohne Genehmigung des Herstellers vor
- Halten Sie die vorgeschriebenen oder in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Fristen für wiederkehrende Prüfungen ein
- Zum Schutz des Patienten und der Polster verwenden Sie bitte Medizinalabdeckungen auf den Polsterbezügen.
- Entsorgen Sie dieses Produkt gemäß geltenden kommunalen Vorschriften auf dem Sperrmüll.


3. HAEMO-FLEXA



UDI-DI	4255626140
Artikelnummer	40361
Tragkraft	600kg
ständige Last	250kg
Armlehnen	gebogen (Arcus) Keilkissen (Cuneo)
Mobilität	feststehend, Mobil, Mobil mit Zentralfeststellung


HAEMO-FLEXA Cuneo

Gewicht ca. 34,0 kg

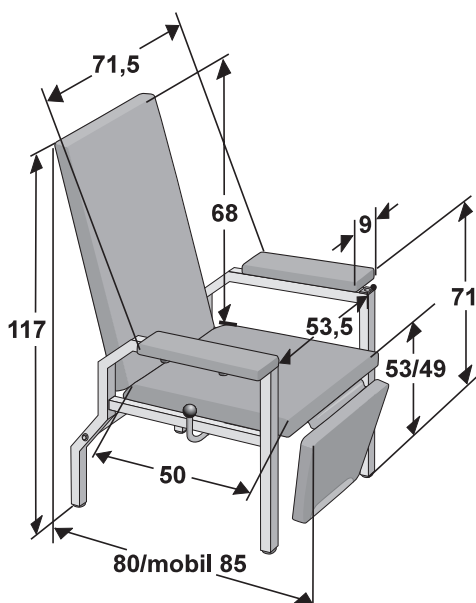

HAEMO-FLEXA Arcus

Gewicht ca. 33,8 kg

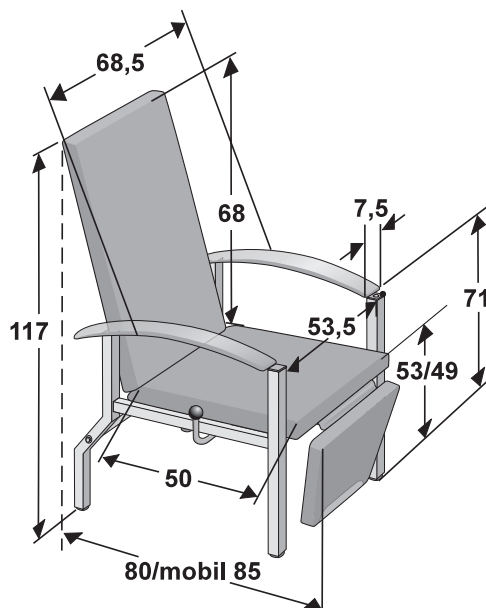

LIEFERUMFANG

Bitte verwenden Sie auf keinen Fall Elektroschrauben oder Knarrenschlüssel, da die Bauteile hierfür nicht ausgelegt sind und dadurch zerstört werden. Alle Schrauben zunächst mit der Hand vormontieren und erst zum Schluss der Montage über Kreuz fest anziehen, so dass sich die Bauelemente optimal zueinander positionieren können. Bei Nichtbeachtung können wir feststellen, ob die Teile durch unsachgemäße Montage beschädigt wurden. Dann erfolgt nur kostenpflichtiger Ersatz.

4. ZUBEHÖRTEILE


- Infusionshalter HAEMO-JEKT
- Armauflage HAEMO-VARIO
- Schutzabdeckung PEDO-PROTECT
- Zubehöradapter HAEMO-ADAPTUS, Stk
- Griffknauf PORTA-FIX, 40mm schwarz
- Ablagetisch HAEMO-WOOD
- Ablagetisch HAEMO-PORT

Art.-Nr. Z4349
 Art.-Nr. Z40319
 Art.-Nr. Z40316
 Art.-Nr. Z40313
 Art.-Nr. Z40303
 Art.-Nr. Z40357
 Art.-Nr. Z40311

nur in Verbindung mit HAEMO-ADAPTUS
nur in Verbindung mit HAEMO-ADAPTUS
nur in Verbindung mit HAEMO-ADAPTUS

5. GEBRAUCH


5.1 VERSTELLUNG DER ARMLEHNE

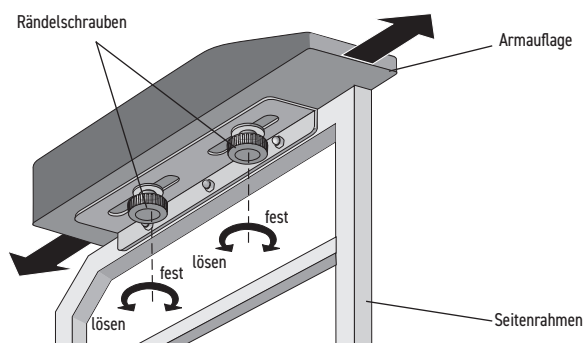

Armauflage verstellen:

1. Rändelschrauben lösen
2. Armauflage in die gewünschte Position schieben
3. Rändelschrauben wieder anziehen

5.1 POLSTERVERSTELLUNG

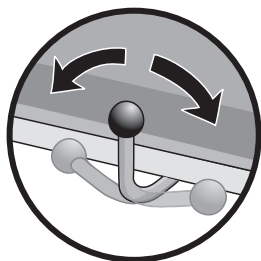

Sitzpolster verschieben:


Hebel nach vorn drehen und das Polster in die gewünschte Position schieben.

Rückenlehne verstellen:

Hebel nach hinten drehen und die Rückenlehne in die gewünschte Position bringen.

5.3 FUNKTION DER VS-ROLLE

(nur bei mobiler Variante)

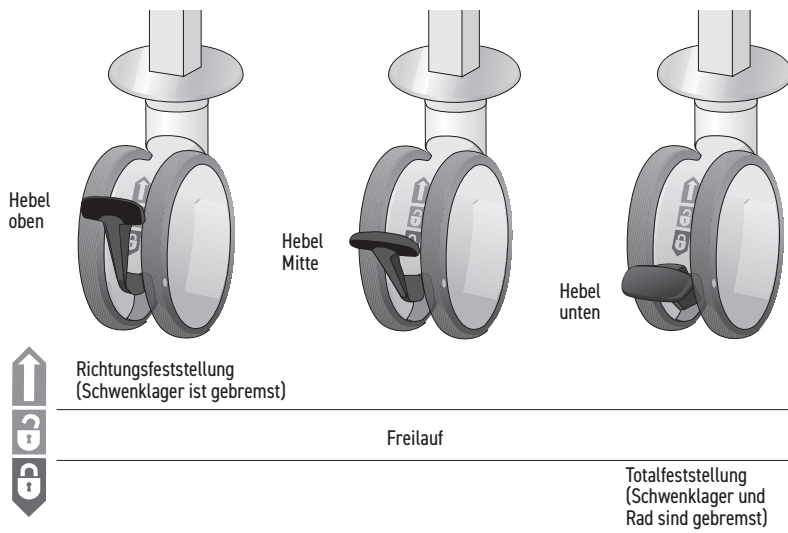

6. WARTUNG UND PFLEGE

7.1 WARTUNG

- Die Laufrollen sind je nach Verschmutzung - aber spätestens alle 3 Monate - gründlich zu reinigen, um die Bremssicherheit und die elektrische Leitfähigkeit sicherzustellen.
- Im Abstand von 6 Monaten sind alle Verschraubungen auf Festigkeit zu prüfen

7.2 PFLEGE

- **ACHTUNG!** Nicht mit tropfnassem Tuch arbeiten, da kein Wasser in die Bauteile eindringen darf
- Niemals Reinigungsmittel mit Scheuermittelzusatz nutzen
- Chromflächen dürfen nicht mit Halogenen (zB: Jod, Chlor) in Berührung kommen, dies zerstört die Oberfläche
- KEINE Sprühdesinfektion, damit kein Produkt in die Bauteile eindringt
- sämtliche Wirkstoffe müssen SOFORT nach der Einwirkzeit rückstandlos entfernt werden um Folgeschäden zu vermeiden
- Kunstlederbezüge benötigen keine materialerhaltende Pflege
- Bezug kann feucht abgewischt werden, danach sofort trocken wischen. Bei stärkerer Verschmutzung soll Seifenwasser genutzt werden. KEINE lösemittel- oder fetthaltigen Reinigungsmittel nutzen
- Verwenden Sie zum Schutz der Polsterbezüge unbedingt Medizinalabdeckungen

Empfohlenes Desinfektions-Präparat:

„Mikrocid sensitive Liquid“ und „Mikrocid sensitive Wipes“ aus dem Hause Schülke & Mayr* aus D-Norderstedt

ACHTUNG! Sollten Sie unübliche Veränderungen/ Geräusche/Gefährdungen während der Nutzung bemerken, bitten wir um sofortige Rückmeldung. Bis zur Klärung des Sachverhaltes darf eine Nutzung nicht mehr erfolgen.

Sie erreichen unseren Kundenservice wie folgt:

Mail: info@simpex.de

Telefon: +49 45 54 - 99 39 0
(Mo. - Do. 8.00 - 16.00 Uhr | Fr. 8.00 - 14.00 Uhr)

7. ERSATZTEILE

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| ■ Auslösehebel | Art.-Nr. ERSA1175 |
| ■ Doppel-Lenkrolle | Art.-Nr. ERSA1184 |
| ■ Gasfeder für Beinplatte | Art.-Nr. ERSA1316 |
| ■ Gasfeder für Rückenlehne | Art.-Nr. ERSA1317 |

WECHSELPOLSTER

- | | |
|--|------------------------------|
| ■ Keilkissen-Armauflagenpolster, 2er Set | Art.-Nr. ERSA1611-XX (Farbe) |
| ■ Arcus-Armauflagenpolster, 2er Set | Art.-Nr. ERSA1614-XX (Farbe) |
| ■ Rückenpolster, inkl. Lordosenstütze | Art.-Nr. ERSA1615-XX (Farbe) |
| ■ Sitzpolster | Art.-Nr. ERSA1616-XX (Farbe) |
| ■ Beinpolster | Art.-Nr. ERSA1617-XX (Farbe) |

8. ENTSORGUNG

Entsorgen Sie dieses Produkt gemäß den lokalen Vorschriften und Bestimmungen.
Bei sichtbarer Kontamination ist vorab eine Desinfektion erforderlich.

Kunststoffe und Metallteile sind recyclebar.

9. HERSTELLERANGABEN

Hersteller: Firma SIMPEX GmbH
Adresse: Dr.-Hermann-Lindrath-Weg 22, 23812 Wahlstedt
Kontakt: 04554 - 99 39 0 | info@simpex.de

EU-Konformitätserklärung zur CE-Kennzeichnung

gemäß EU-Richtlinie für Medizinprodukte 2017/745 nach Anhang IV

Hersteller / Manufacturer



SIMPEX GmbH
Dr.-Hermann-Lindrath-Straße 22
23812 Wahlstedt
Deutschland
SRN: DE-MF-000009464

Gekennzeichnet durch / Marked by



erklärt hiermit in eigener Verantwortung, dass folgende(s) Produkt(e)
declares on its own authority that the following medical device(s)

	Basis UDI-DI	Artikelnummer
HAEMO-FLEXA	4255626124	40361

für folgende Zweckbestimmung
for the further purpose

Blutentnahme-, Infusions-, EEG- und Verbandstühle zum Einsatz in medizinisch genutzten Räumen.
Blood sampling, infusion and surgery chairs to be used in a medical environment.

den grundlegenden Anforderungen der nachfolgenden Verordnung entsprechen
comply with the essential requirements of the following regulation

Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 05.04.2017
Agreement of the EU directive for medical devices 2017/745
Medical Device Regulation

mit folgenden angewandten Normen
with the following applied standards

DIN EN ISO 15223-1:2013-02	Medizinprodukte - Symbole zur Verwendung im Rahmen der vom Hersteller bereitzustellenden Informationen Teil 1: Allgemeine Anforderungen Medical devices - Symbols to be used with information to be supplied by the manufacturer Part 1: General requirements
----------------------------	--

Klassifizierung nach MDR
Classification according to MDR

Klasse 1 - gemäß Anhang VIII der MDR, Regel 1
Class 1 - Annex IV of MDR, Rule 1

Aussteller / Issued by Benjamin Storm (Geschäftsführer / CEO)

Wahlstedt, den 01.04.2023

Ort, Datum / place, date

Unterschrift / signature

Qualität, Sicherheit & Hygiene
Medizinmöbel seit 1972